

# Philips ZOOM! QuickPro 20%

Новая система клинического  
отбеливания



# Philips Zoom! QuickPro 20%

*Инновационная технология отбеливания зубов за минимальное время*



**5 минут у стоматолога – до 4-х оттенков светлее\***

**Уникальная двухслойная технология позволяет запечатать перекись водорода на поверхности зуба**

**Минимальная чувствительность**

**Безопасно в использовании**

\* Средний показатель отбеливания

# Инновационная двухслойная технология

До 4-х оттенков светлее\*

- **20%** перекись водорода
- Инновационный слой **герметика**
- Через **5 минут** после нанесения пациент может освободить стоматологическое кресло
- Через **30 минут** пациент самостоятельно удаляет лак салфеткой или зубной щеткой без пасты

\* Средний показатель отбеливания



*20% НР отбеливающий лак*



*Слой герметика*



## Инструкция по использованию Philips ZOOM! QuickPro 20%

1. Сразу после полировки профилактической пастой, нанесите на губы масло с витамином Е
2. Установите ретрактор
3. Нанесите тонким слоем защитный материал **Liquidam**
4. Провести полимеризацию широкими движениями в течение 3-5 секунд
5. Нанесите на **Liquidam** масло с витамином Е тонким слоем
6. Кисточкой нанесите отбеливающий лак и дайте ему высохнуть в течение 30 секунд
7. Второй кисточкой нанесите герметик вторым слоем и дайте ему высохнуть в течение 30 секунд
8. Аккуратно удалите слой **Liquidam**
9. Снимите ретрактор и нанесите на губы масло с витамином Е
10. Через 30 минут пациент может самостоятельно удалить отбеливающий лак салфеткой или зубной щеткой без пасты

1



Apply vitamin E oil

2



Insert cheek retractor

3



Apply Liquidam

4



Cure Liquidam

5



Coat Liquidam with vitamin E oil

6



Apply whitening varnish (vial 1)

7



Apply sealer (vial 2)

8



Remove Liquidam

9



Remove cheek retractor

10



Check that patient is comfortable